


Устройство трансфузионное однократного применения с пластиковой иглой

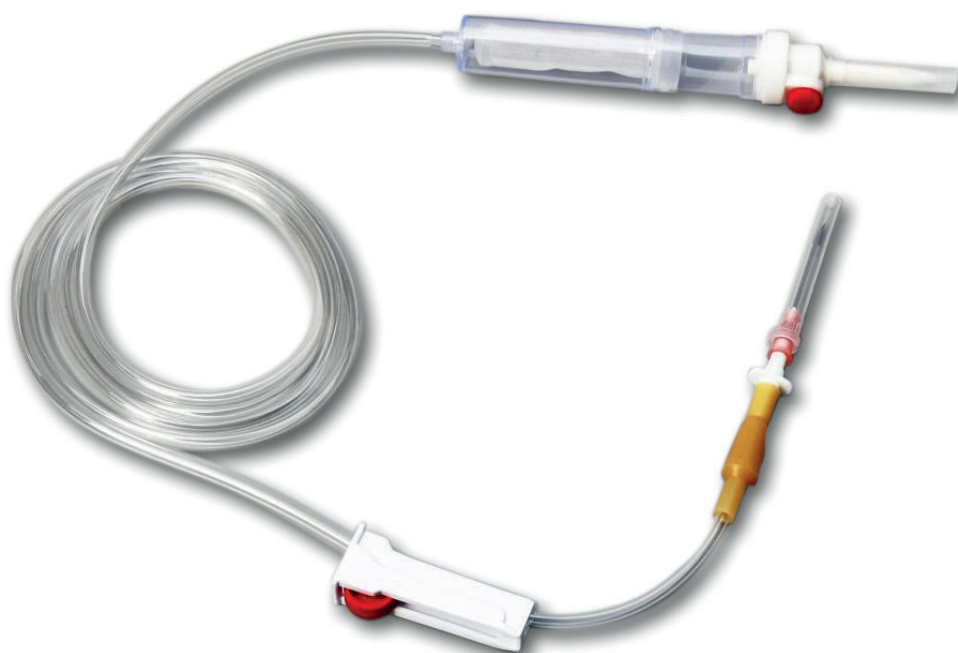


Изготовитель

SF Medical Products GmbH, Германия

Описание продукта

- Устройство трансфузионное однократного применения с пластиковой иглой и инъекционной иглой 18G x 1½" (1,2 мм x 40 мм) предназначено для гравитационного вливания крови и кровезаменителей. Является стерильным и апирогенным. Применяется только для медицинских целей. Устройство состоит из пластиковой заборной иглы, интегрированной в каплеобразующую камеру с фильтром для крови, прозрачной трубки, гибкого инъекционного узла, коннектора типа Луер и инъекционной иглы.
- Заборная пластиковая игла имеет три боковых и одно центральное отверстия, расположенные на разных уровнях, а также встроенный воздушный клапан для очистки воздуха. Воздушный клапан имеет цветную кодировку – красную – для облегчения идентификации. Воздушный клапан обеспечен водонепроницаемой антибактериальной мембраной.
- Каплеобразующая камера является прозрачной, что позволяет контролировать уровень жидкости и последовательность каплепадения. Длина прозрачной трубки 150 – 160 см. Роликовый зажим позволяет производить плавную и точную регулировку скорости трансфузии.
- Игла 18G x 1½" (1,2 мм x 40 мм) имеет трехгранную лазерную заточку и силиконовое покрытие для снижения травматичности и болезненности при проникновении в ткани.
- Маркировка упаковки содержит всю информацию, необходимую для идентификации и безопасного использования медицинских изделий.

Устройство трансфузионное однократного применения с пластиковой иглой

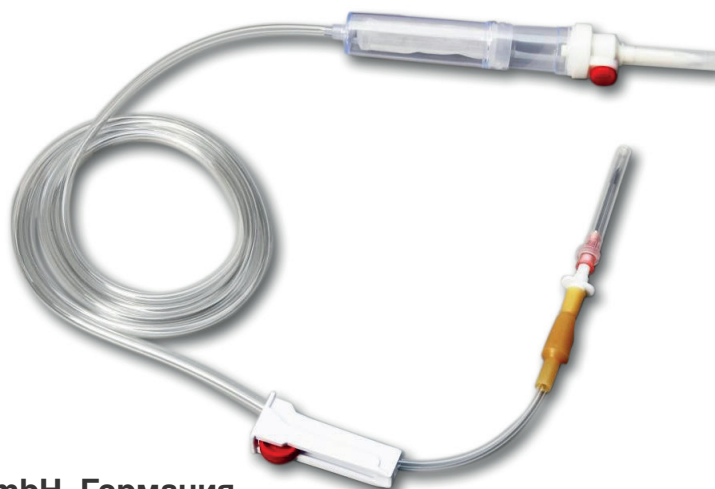

Изготовитель
SF Medical Products GmbH, Германия

Материал:

- Заборная пластиковая игла: АБС-пластик
- Каплеобразующая камера: медицинский поливинилхлорид
- Прозрачная трубка: медицинский поливинилхлорид
- Гибкий инъекционный узел: латексный каучук
- Инъекционная игла: медицинская нержавеющая сталь

Качество:

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества ISO 13485
Устройство трансфузионное соответствует стандарту ISO 1135-4, ГОСТ 25047

Свойства продукта:

Устройство трансфузионное однократного применения с пластиковой иглой обладает следующими функциональными характеристиками:

- Стерильность и апиrogenность;
- Пластиковая заборная игла;
- Регулируемая с помощью роликового зажима скорость трансфузии;
- Гибкий узел для инъекций;
- Прозрачная соединительная трубка;

Медицинское изделие предназначено только для медицинских целей.

Срок годности: 5 лет

Стерилизация: газовая (этиленоксид)

Наименование изделия	Размер иглы	Диаметр иглы, мм	Длина иглы, мм	Цветовая кодировка иглы	Количество в групповой упаковке	Артикул
<i>Устройство трансфузионное однократного применения с пластиковой иглой</i>						
Устройство трансфузионное однократного применения с пластиковой иглой	18G x 1½"	1,2	40	розовый	20	10.103.026

Маркировка продукции:



STERILE EO